

移动端软件

安心网手机APP

(福是心安快速操作手册)

V1.0

*本用户手册如有更改，用户不一定能及时得到通知。详细信息请查阅终端设备说明书，不便之处，敬请原谅。

下载、安装



① APP下载

- ② 扫描APP二维码，在打开的网页中选择您所使用的手机或Pad类型，下载安装软件，建议在有Wi-Fi的环境下下载安装。

—下载\安装—

用户

A.个人：用户通过“个人”入口，使用智能设备检测心电、血压、血糖等参数，了解个人健康状况，并可享受安心网平台医生提供的咨询服务。

B.安心网医生：医生在“安心网医生”入口注册，成为安心网平台医生，为平台的个人用户提供咨询服务。

C.院内医生：部署了安心网平台系统的医院，医生通过“院内医生”入口登录院内系统，处理院内业务。

—用户定义—

A.个人

一、注册

- ① 以安卓手机个人入口为例，点击“注册”。



- ② 输入手机号码，获取验证码，并填写密码。



—个人—

- ③ 注册成功后会返回登录界面。



- ④ 为了让邦健心电算法准确的做出判断，请填写真实的个人信息。



—个人—

二、测量

- ① 以手机“个人入口”为例，点击“测量”，点击“采集心电图”。



- ② 选择“片段心电图”。




—个人—

- ③ 蓝牙连接心电采集设备，注意此时eCare 3须处于开机状态。



- ④ 根据教学视频指导，佩戴心电电极，完成后点击“开始采集”按钮。

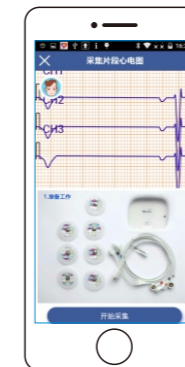


—个人—

- ⑤ 待采集30s后，点击“结束采集”按钮，软件会自动弹出初步的诊断结果。



- ⑥ 在分析报告界面，点击“查看心电图”，查看心电波形。

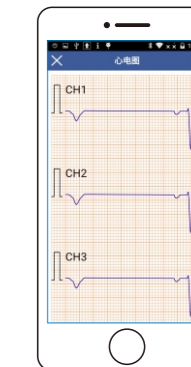

—个人—

三、找医生

① 在分析报告界面，点击“找医生”，可以将您采集的心电图发送给平台医生进行心电咨询。



② 完成支付操作后，医生将接收到您的咨询请求及您采集的心电数据。



—一个人—

③ 医生诊断结束后，结论将反馈到您的手机，在“找医生”的“已诊断”中将会看到医生给出的结论。



—一个人—

B.安心网医生

一、注册

① 以安卓手机“安心网医生”入口为例，点击“注册”。



② 提交身份证正反面图片，输入身份证号、姓名、手机号码，获取验证码，并填写密码。



—安心网医生—

③ 注册成功后会返回登录界面。



④ 为确保您的信息能尽快通过审核，请提供真实的个人信息。



—安心网医生—

⑤ 在“我的”的“诊金设置”中，编辑诊金。



二、诊断

① 点击“待诊断”或“待审核”病历，进入心电图详情界面，查看心电图，并编辑诊断结论。



—安心网医生—

② 点击“待诊断”或“待审核”病历，进入心电图详情界面，查看心电图，并编辑诊断结论。



—安心网医生—

C.院内医生

一、登录

以安卓手机“院内医生”入口为例，输入用户名、密码和服务器地址及端口，点击“登录”。



二、诊断

① 在心电图界面，查看诊断病历列表。



—院内医生—

② 1. 点击“待诊断”或“待协诊”或“待会诊”或“待审核”病历，进入心电图详情界面，查看心电图，并编辑诊断结论。



—院内医生—